


Kit pour l'auto-prélèvement d'un échantillon d'urine en vue du dépistage de la chlamydia génitale et blennorragie, responsables des maladies sexuellement transmissibles. L'échantillon est analysé en laboratoire par PCR pour détecter l'ARN des deux agents pathogènes. Le test est recommandé pour les individus après tout rapport sexuel présentant un risque d'infection. Pour obtenir un résultat de test significatif, le test doit être effectué au moins 14 jours après le contact sexuel.

## Contenu du paquet

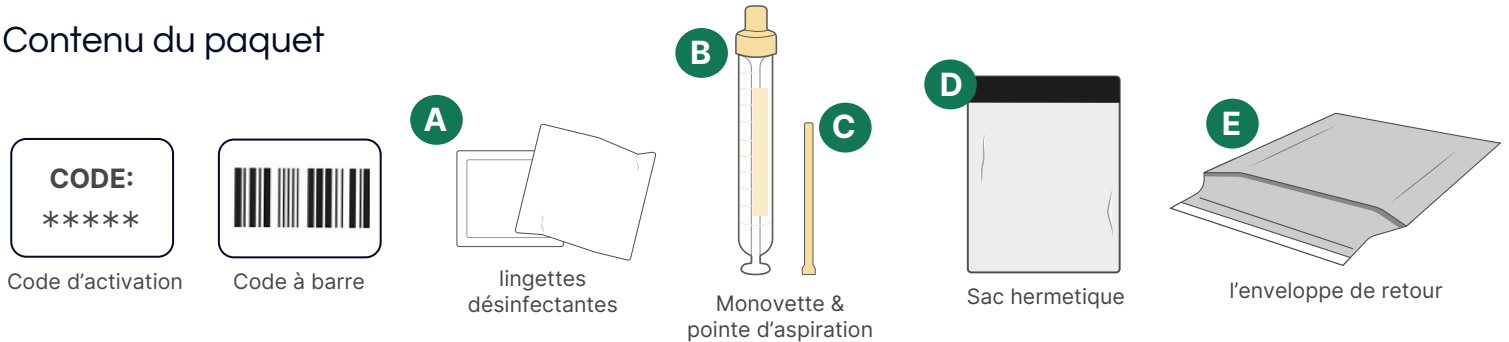

## Étape 1 : Activation en ligne




Effectuez le test au plus tôt 14 jours après un rapport sexuel à risque d'infection.



Saisissez le code d'activation inclus sur [360-health.ch](https://360-health.ch) et répondez aux questions d'activation.

## Étape 2 : Prends ton échantillon

- 1** Votre dernière visite aux toilettes doit remonter à plus d'une heure. Lavez-vous les mains. Ouvrez le paquet de lingettes désinfectantes **A** et utilisez-les pour désinfecter vos mains.
- 2** Prenez un verre propre et urinez directement dans le récipient (premier jet d'urine seulement!). Videz le reste de votre vessie dans les toilettes.
- 3** Ouvrez l'emballage du Monovette **B** et de la pointe d'aspiration **C**. Retirez le capuchon du Monovette et mettez-le de côté pour plus tard. **Ne le jetez pas !** Attachez la pointe d'aspiration au Monovette (voir photo 1). Plongez la pointe d'aspiration dans le verre rempli d'urine et remplissez le Monovette jusqu'à la graduation en tirant sur le piston (voir photo 2).
- 4** Retirez le Monovette contenant l'urine du récipient et retournez-le de manière à ce que la pointe d'aspiration soit orientée vers le haut. Tirez le piston aussi loin que possible pour vider la pointe. Cassez le piston (voir photo 3) et retirez la pointe d'aspiration. Remplacez le capuchon pour fermer le Monovette et jetez le piston et la pointe d'aspiration.
- 5** Collez le code barre inclus sur le Monovette (voir photo 4). Placez le tube à essai dans le sac hermetique. **D** Fermez le sac en retirant la bande adhésive. Placez le sac hermetique dans l'enveloppe de retour **E** et fermez-la (voir photo 5). Placez l'enveloppe de retour dans une boîte aux lettres avant la dernière collecte de la journée. **Par temps extrêmement chaud ou froid, utilisez une boîte aux lettres protégée ou un bureau de poste pour l'expédition au laboratoire.**

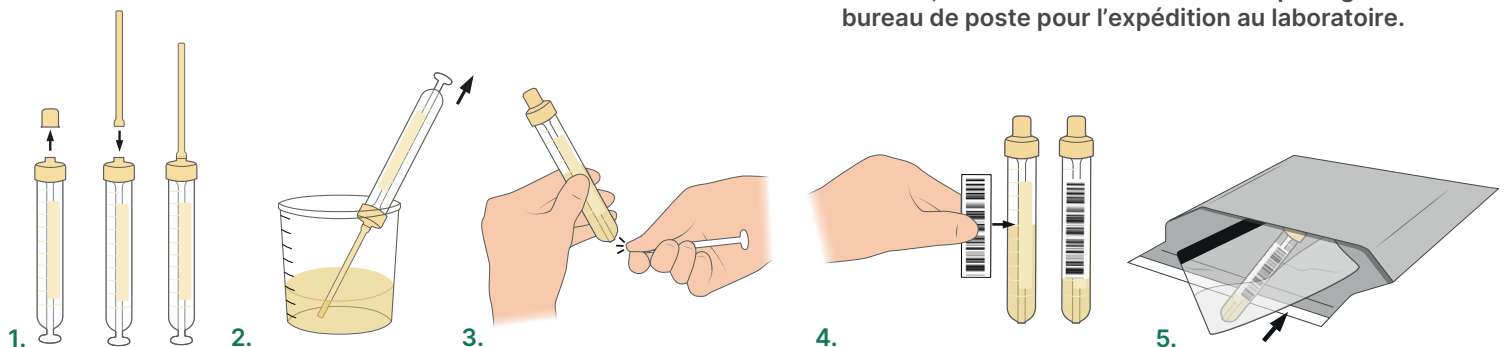

## Étape 3 : Résultats de laboratoire

Vos résultats seront normalement disponibles 2 à 3 jours ouvrables après l'envoi de votre échantillon au laboratoire. Vous serez informé par e-mail lorsque les résultats seront disponibles.



Ce produit est destiné à un usage unique uniquement. N'utilisez pas le test si l'emballage stérile du Monovette ou du tube est endommagé ou si la date de péremption (voir emballage extérieur) du test est dépassée. Demandez un nouveau test en nous contactant. Stockez et transportez entre 2 et 25 degrés. Tout incident grave lié au dispositif doit être signalé au fabricant.



360-health.ch est une marque de City Integration Switzerland GmbH, Rigiweg 21a, CH-6343 Holzhäusern. UID CHE-289.558.351.  
E-mail : [info@360-health.ch](mailto:info@360-health.ch) Site web : [www.360-health.ch](http://www.360-health.ch)

Analyses de laboratoire fournies par : A-Labs Switzerland GmbH, Kilchbergstrasse 6, CH-8134 Adliswil. Numéro d'autorisation Swissmedic : 512603-102704006