


Kit zur Selbstentnahme einer Urinprobe zur Untersuchung auf Gonokokken und Chlamydien - verantwortlich für sexuell übertragbare Krankheiten. Die Probe wird im Labor mittels PCR auf die RNA beider Erreger analysiert. Der Test wird nach jedem Geschlechtsverkehr mit Infektionsrisiko empfohlen. Um ein aussagekräftiges Testergebnis zu erhalten, sollte der Test frühestens 14 Tage nach einem solchen sexuellen Kontakt durchgeführt werden.

Paketinhalt

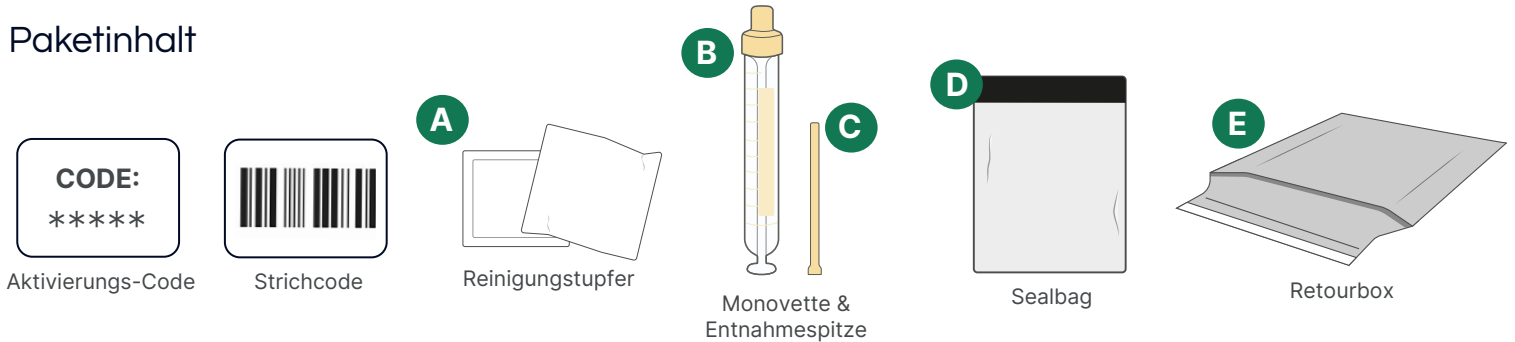

Schritt 1: Test online aktivieren




Führen Sie den Test frühestens 14 Tage nach dem Geschlechtsverkehr mit Infektionsrisiko durch.



Geben Sie den beiliegenden Aktivierungscode auf 360-health.ch ein und beantworten Sie die Aktivierungsfragen.

Schritt 2: Probe entnehmen

- Ihr letzter Toilettengang sollte vor mehr als einer Stunde gewesen sein.** Waschen Sie sich die Hände. Öffnen Sie das Paket mit Desinfektionstüchern **A** und verwenden Sie sie, um Ihre Hände zu desinfizieren.
- Nehmen Sie ein sauberes Glas und urinieren Sie etwas direkt hinein (erster Urin!). Entleeren Sie den Rest Ihrer Blase in die Toilette.
- Öffnen Sie die Verpackung des Monovette **B** und der Entnahmespitze **C**. Nehmen Sie den Deckel der Monovette ab und legen Sie ihn beiseite. **Werfen Sie ihn nicht weg!** Befestigen Sie die Entnahmespitze an der Monovette (siehe Bild 1). Tauchen Sie nun die Entnahmespitze in das mit Urin gefüllte Glas und füllen Sie die Urin-Monovette bis zur Markierung, indem Sie die Entnahmespitze Kolben herausziehen (siehe Bild 2).
- Nehmen Sie die Monovette mit Urin aus dem Behälter und drehen Sie es um, sodass die Entnahmespitze nach oben zeigt. Ziehen Sie den Kolben so weit wie möglich heraus, damit sich die Entnahmespitze entleert. Brechen Sie den Kolben ab (siehe Bild 3) und entfernen Sie die Entnahmespitze. Setzen Sie den Deckel wieder auf, um die Monovette zu verschließen, und entsorgen Sie den Kolben und die Entnahmespitze.
- Kleben Sie den beiliegenden Barcode auf die Monovette (siehe Bild 4).** Legen Sie das Teströhrchen in den Verschlussbeutel **D**. Verschließen Sie den Beutel, indem Sie den Klebestreifen abziehen. Legen Sie den Verschlussbeutel in das Rücksendekouvert **E** und schließen Sie es (siehe Bild 5). Legen Sie das Rücksendekouvert vor der letzten Abholung des Tages in einen Briefkasten. **Bei extremen Hitze- oder Kältebedingungen verwenden Sie einen geschützten Briefkasten oder die Post für den Versand an das Labor.**

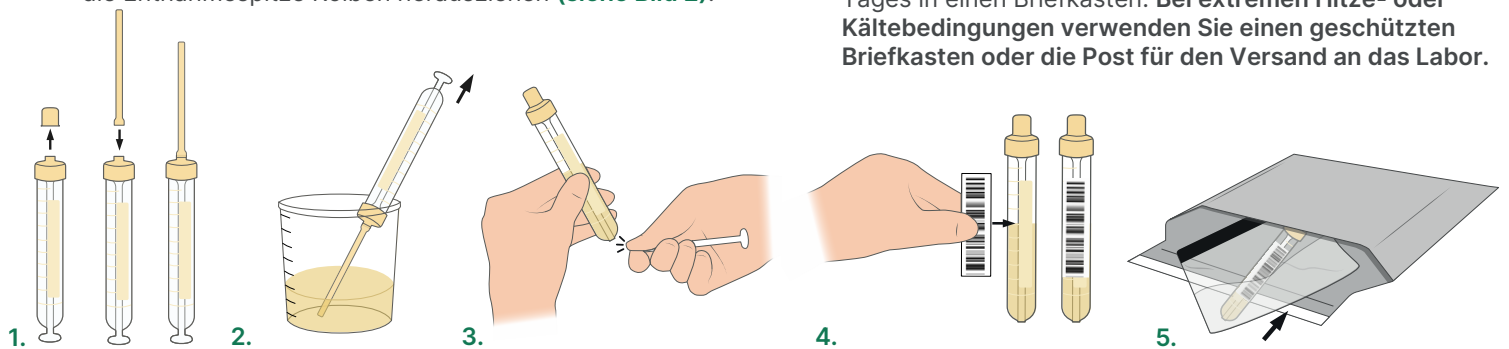

Schritt 3: Laborbefund

Ihre Ergebnisse sollten normalerweise 1-2 Werktage nach dem Versand Ihrer Probe an das Labor verfügbar sein. Sie werden per E-Mail benachrichtigt, wenn die Ergebnisse vorliegen.



Dieses Produkt ist nur zur einmaligen Gebrauch bestimmt. Verwende es nicht, wenn die sterile Verpackung der Monovette® oder das Probenröhrchen selbst beschädigt ist oder das Verfallsdatum (siehe äußere Verpackung) des Tests abgelaufen ist. Fordere in diesem Fall unter info@360-health.ch einen neuen Test an. Lagere und transportiere den Test bei 2 bis 25 Grad. Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder der Patient ansässig ist, gemeldet werden.

